

v VARDIS

SWITZERLAND

BIOMIMETIC DENTAL SCIENCE

CURODONT™ D'SENZ

Professional protection for sensitive teeth

Professioneller Schutz für empfindliche Zähne

Protezione professionale per i denti sensibili

Protection professionnelle pour les dents sensibles



CURODONT™ D'SENZ keeps the teeth healthy and in good condition. The v VARDIS TECHNOLOGY in CURODONT™ D'SENZ forms a highly effective protective barrier on the teeth. Professional protection for sensitive teeth.

CURODONT™ D'SENZ hält die Zähne gesund und in gutem Zustand. Die v VARDIS TECHNOLOGIE in CURODONT™ D'SENZ bildet eine hochwirksame Schutzbarriere auf den Zähnen. Professioneller Schutz für empfindliche Zähne.

CURODONT™ D'SENZ maintient les dents en bonne santé et en bon état. La TECHNOLOGIE v VARDIS de CURODONT™ D'SENZ forme une barrière protectrice très efficace sur les dents. Protection professionnelle pour les dents sensibles.

CURODONT™ D'SENZ mantiene i denti sani e in buone condizioni. La TECNOLOGIA v VARDIS de CURODONT™ D'SENZ forma una barriera protettiva molto efficace sui denti. Protezione professionale per i denti sensibili.


INSTRUCTIONS

In the dental office

CURODONT™ D'SENZ is applied by the dental hygienist or the dentist with a rubber polisher or a micro brush.

At home

Apply with the finger or an inter-dental brush. Leave on for 1-2 minutes. Spit out residues, if necessary.

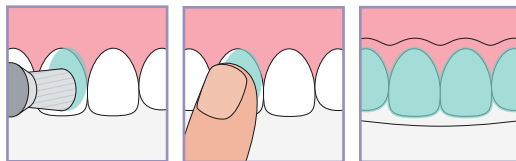

In der Zahnarztpraxis

CURODONT™ D'SENZ wird von der Dentalhygienikerin oder dem Zahnarzt mit einem Gummipolierer oder einer Mikrobürste aufgetragen.

Zu Hause

Mit dem Finger oder einer Interdentälbürste auftragen. 1-2 Minuten einwirken lassen. Rückstände ggf. ausspucken.

Dans le cabinet dentaire

CURODONT™ D'SENZ est appliqué par l'hygiéniste dentaire ou le dentiste avec une gomme de polissage ou une micro-brosse.

À la maison

Appliquer avec le doigt ou une brosse interdentaire. Laisser agir 1 à 2 minutes. Cracher les restes si nécessaire.

Nello studio dentistico

CURODONT™ PROTECT viene applicato dall'igienista dentale o dal dentista con un lucidatore o con un microspazzolino.

A casa

Applicare con il dito o con uno spazzolino interdentale. Lasciare agire per 1-2 minuti. Sputare i residui, se necessario.

INGREDIENT LIST

Ingredients: Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Hydrated Silica, PEG-8, Cellulose Gum, Sodium Monofluorophosphate, Aroma, Sodium Saccharin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Dicalcium Phosphate, Oligopeptide-104, Calcium Glycerophosphate, Limonene, Cinnamal

CONTENT

Contains Sodium monofluorophosphate (900 ppm F⁻)

Enthält
Natriummonofluorophosphat
(900 ppm F⁻)

Contient du
monofluorophosphate de
sodium (900 ppm F⁻)

Contiene Monofluorofosfato
di sodio
(900 ppm F⁻)

WARNING

Not for children under 6 years of age

Nicht für Kinder
unter 6 Jahren
geeignet

Ne convient pas
aux enfants de
moins de 6 ans

Non adatto per
bambini di età
inferiore ai 6 anni